

# COVID -19 Antigen Schnelltest (Selbsttest)


## Schritt 1: Vorbereitung

Material bereitlegen, Deckel abnehmen




## Schritt 2: Vorbereitung

Tupfer oben öffnen

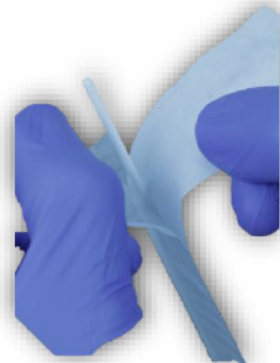

## Schritt 3: Abstrich

Tupfer einführen, bis ein **leichter Widerstand spürbar** ist (ca. 2cm), mit leichtem Druck gegen die Nasenwand **5x drehen**; im zweiten Nasenloch wiederholen **Maske wieder anziehen!**

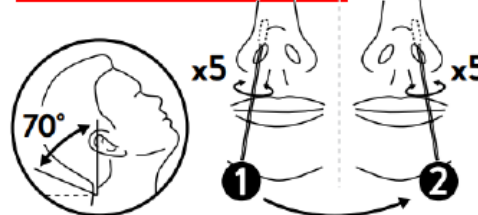


## Schritt 4: Tupfer in Röhrchen

Tupfer in Röhrchen stecken, **in der Flüssigkeit schwenken** und ca. 5x gegen den Boden/die Wand drücken



## Schritt 5: Tupfer ausdrücken

Tupfer bis in die Mitte des Röhrchens rausziehen, **Röhrchen beim Tupferkopf zusammendrücken**, **Tupfer abbrechen** und Röhrchen mit **Deckel** verschließen

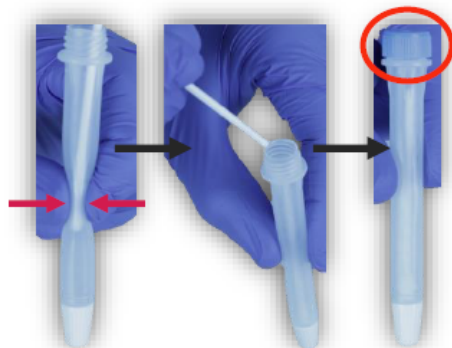

## Schritt 6: Flüssigkeit auf Testkassette

Testkassette öffnen, untere Kappe (weiß) des Röhrchens öffnen und **5 Tropfen** in die **runde Probenvertiefung** tropfen



## Schritt 7: Auswertung

Strich nur bei C → Test negativ  
Strich bei C & T → Test positiv

Wichtig: Der Test ist nicht 100%-tig genau; es gibt **falsch-positive** (ca. 2%) und **falsch-negative** Ergebnisse.

Ergebnis positiv!



Ergebnis negativ!



Ungültig!



Ungültig!

**Müll erst beim Rausgehen in den Restmüll vorne, beim Rausgehen Hände desinfizieren!**